

# インプラント・リムーバル・キット



Designed for Atraumatic Removal of Failed Implants

# 概要

## DESIGNED WITH PATIENTS IN MIND

インプラント・リムーバル・キットは、骨損傷を最小限に抑え、インプラント除去を可能にしたキットです。また、各社インプラントシステムとの互換性があり、様々なインプラントシステムへの使用が可能です。

### インプラント失敗要因について


インプラントの失敗は様々な要因があります。

例) 骨喪失、インプラント周囲炎、固定不良、インプラントの破折 等

短期間での失敗は骨治癒過程の不良によるものが多いと言われています。

長期間での失敗は治癒後、インテグレーションしたインプラントに起こります。

例) インプラント周囲炎

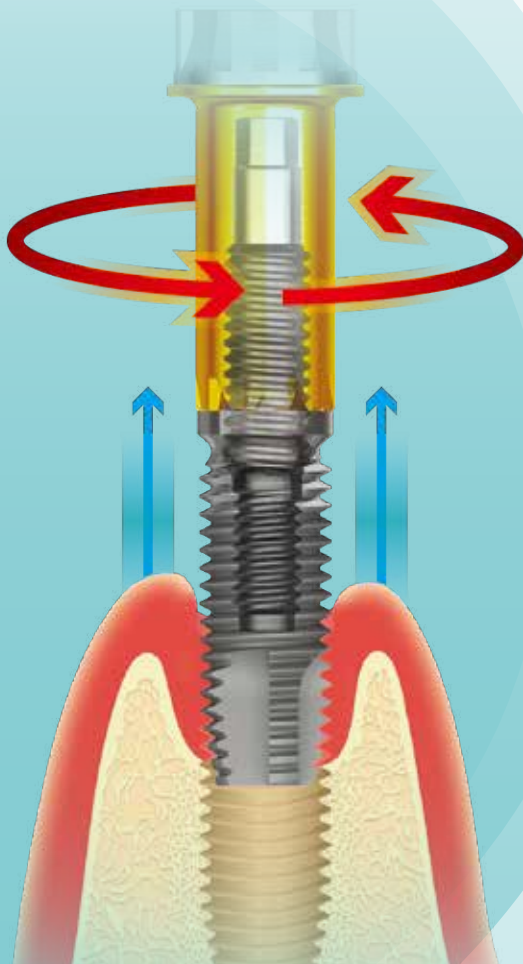

### トレフィンバーを使用せず 骨損傷を最小限に抑えたインプラント除去

- ・インプラントの非侵襲的除去を実現
- ・最小限の骨損傷
- ・各社インプラントシステムとの互換性

# インプラント・リムーバル・キット


## トレイ・コンポーネント




インプラント・リムーバー  
インプラント適合サイズ：  
φ3.5 mm ~ 8 mm



インプラント・リムーバル・スクリュー  
トレイへの収納位置が容易に識別できるカラーコード

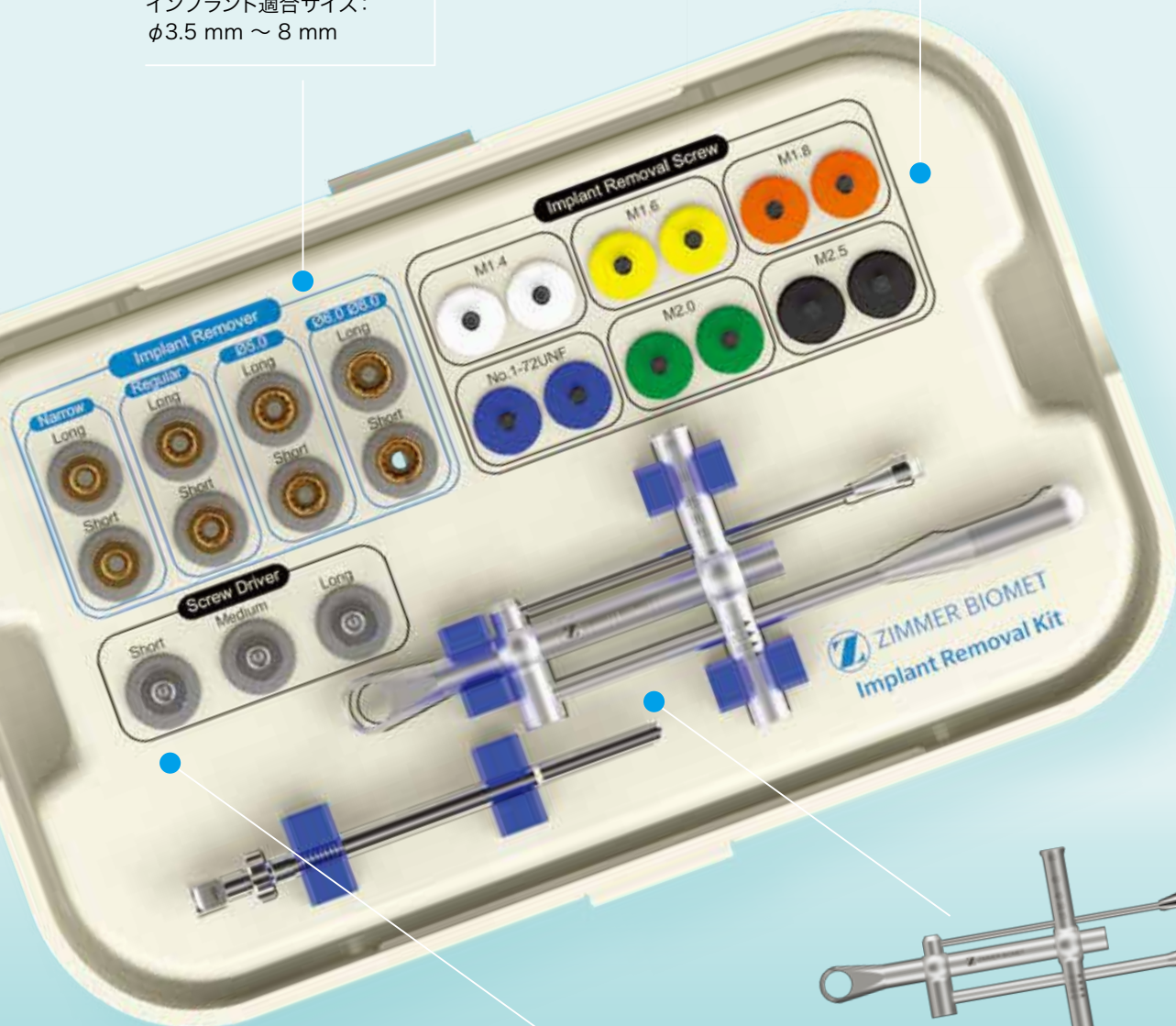

スクリュー・ドライバー  
3種類の長さ  
・ショート (7 mm)  
・ミディアム (12 mm)  
・ロング (17 mm)

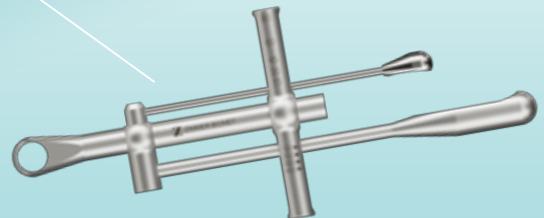

インプラント・リムーバル・ラチェットレンチ  
インプラント除去中の最小・最大トルクの表示

# インプラント・リムーバ

## ジンマー・バイオメット

システム	インプラント直径	スクリューサイズ	製品番号
サーテン・インターナル・コネクション	All	M1.6	IRSR16
エクスターナル・コネクション	All	M2.0	IRSR20
テーパード・スクリュー・ベント	All	1-72UNF	IRSR172
テーパード・スイス・プラス	3.8 mm <sup>※1</sup>	1-72UNF	IRSR172
	4.8 mm <sup>※1</sup>	M2.0	IRSR20
ストレート・スイス・プラス	4.1 mm	M2.0	IRSR20
	4.8 mm	M2.0	IRSR20
スプライン	All	1-72UNF	IRSR172

※1 テーパード・スイス・プラスは、プラットフォームの直径になります。  
注：トラベキュラメタルは、対応していません。

## ストローマン

システム	インプラント直径	スクリューサイズ	製品番号
ティッシュレベル・スタンダード/ スタンダード・プラス/ テーパード・エフェクト	All	M2.0	IRSR20
ボーンレベル/ボーンレベル テーパード・インプラント NC	3.3 mm	M1.6	IRSR16
ボーンレベル/ボーンレベル テーパード・インプラント RC	4.1 mm	M1.6	IRSR16
	4.8 mm	M1.6	IRSR16

## デンツプライ・シロナ

システム	インプラント直径	スクリューサイズ	製品番号
ザイブ S・プラス	3.0 mm	M1.4	IRSR14
	3.4 mm	M1.6	IRSR16
	3.8 mm	M1.6	IRSR16
	4.5 mm	M1.6	IRSR16
	5.5 mm	M1.6	IRSR16
アストラテック・オッセオスピード TX	3.0S	M1.4	IRSR14
	3.5S	M1.6	IRSR16
	4.0S	M1.6	IRSR16
	5.0S	M2.0	IRSR20
	4.5 mm	M2.0	IRSR20
アストラテック・オッセオスピード EV	3.0 mm	M1.4	IRSR14
	3.6 mm	M1.6	IRSR16
	4.2 mm	M1.8	IRSR18
	4.8 mm	M2.0	IRSR20
	5.4 mm	M2.0	IRSR20
アストラテック・オッセオスピード・プロファイル EV	4.2 mm	M1.8	IRSR18
	4.8 mm	M2.0	IRSR20

## ノーベル・バイオケア

システム	インプラント直径	スクリューサイズ	製品番号
ブローネマルク・システム Mk III/IV グルービー/タイユナイト/ショーティー NP	3.3 mm	M1.6	IRSR16
ブローネマルク・システム Mk III/IV グルービー/タイユナイト/ショーティー RP	3.75 mm	M2.0	IRSR20
	4.0 mm	M2.0	IRSR20
ブローネマルク・システム Mk III/IV グルービー/タイユナイト/ショーティー WP	5.0 mm	M2.5	IRSR25
ノーベル・スピーディー・グルービー NP	3.3 mm	M1.6	IRSR16
ノーベル・スピーディー・グルービー RP	4.0 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・スピーディー・グルービー WP	5.0 mm	M2.5	IRSR25
	6.0 mm	M2.5	IRSR25
ノーベル・リプレイス・テーパード NP	3.5 mm	M1.8	IRSR18
ノーベル・リプレイス・テーパード RP	4.3 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・リプレイス・テーパード WP	5.0 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・リプレイス・テーパード 6.0	6.0 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・リプレイス・セレクト・テーパード NP	3.5 mm	M1.8	IRSR18
ノーベル・リプレイス・セレクト・テーパード RP	4.3 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・リプレイス・セレクト・テーパード WP	5.0 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・リプレイス・セレクト・テーパード 6.0	6.0 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・アクティブ 3.0	3.0 mm	M1.4	IRSR14
ノーベル・アクティブ NP	3.5 mm	M1.6	IRSR16
ノーベル・アクティブ RP	4.3 mm	M2.0	IRSR20
	5.0 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・アクティブ WP	5.5 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・パラレル CC NP	3.75 mm	M1.6	IRSR16
ノーベル・パラレル CC RP	4.3 mm	M2.0	IRSR20
	5.0 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・パラレル CC WP	5.5 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・リプレイス CC NP	3.5 mm	M1.6	IRSR16
ノーベル・リプレイス CC RP	4.3 mm	M2.0	IRSR20
	5.0 mm	M2.0	IRSR20
ノーベル・リプレイス・セレクト TC NP	3.5 mm	M1.8	IRSR18
ノーベル・リプレイス・セレクト TC RP	4.0 mm	M2.0	IRSR20

# ル・キット チャート表

カムログ			
システム	インプラント直径	スクリューサイズ	製品番号
カムログ	3.3 mm	M1.6	IRSR16
	3.8 mm	M1.6	IRSR16
	4.3 mm	M1.6	IRSR16
	5.0 mm	M2.0	IRSR20
	6.0 mm	M2.0	IRSR20
コーンログ	3.3 mm	M1.6	IRSR16
	3.8 mm	M1.6	IRSR16
	4.3 mm	M1.6	IRSR16
	5.0 mm	M2.0	IRSR20
iSy	All	M1.6	IRSR16

バイオホライズン			
システム	インプラント直径	スクリューサイズ	製品番号
デーバード・インターナル・インプラント	All	1-72UNF	IRSR172
Laser-Lok 3.0	3.0 mm	1-72UNF	IRSR172
ティッシュレベル	All	1-72UNF	IRSR172

トーマン・メディカル			
システム	インプラント直径	スクリューサイズ	製品番号
SPI エlement	3.5 mm	M1.4	IRSR14
	5.0 mm	M1.6	IRSR16
	6.0 mm	M1.6	IRSR16
SPI コンタクト	3.5 mm	M1.4	IRSR14
	5.0 mm	M1.6	IRSR16

キーストン・デンタル			
システム	インプラント直径	スクリューサイズ	製品番号
レストア・スモール・ダイアメーター	3.3 mm	M1.8	IRSR18
レストア・レギュラー・ダイアメーター	3.75 mm	M2.0	IRSR20
	4.0 mm	M2.0	IRSR20
レストア・ワイド・ダイアメーター	5.0 mm	M2.5	IRSR25
	6.0 mm	M2.5	IRSR25
ステージ-1	All	M2.0	IRSR20

注:記載のない他社インプラントシステムにおいては、最大径の M2.5 (IRSR25) から試適を行ない、降順に利用可能な直径の試適を行なうことにより互換性の確認ができます。

	製品名	製品番号
	インプラント・リムーバル・キット ・IRKITには下記の製品が同梱されています。	IRKIT
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.4 (2個入)	IRSR14
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.6 (2個入)	IRSR16
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M1.8 (2個入)	IRSR18
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント No. 1-72UNF (2個入)	IRSR172
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.0 (2個入)	IRSR20
	インプラント・リムーバル・スクリュー・リプレースメント M2.5 (2個入)	IRSR25
	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 15 mm 【ナロー / ショート】	IR315
	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 15 mm 【レギュラー / ショート】	IR415
	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 15 mm 【ワイド φ 5.0 / ショート】	IR515
	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 15 mm 【ワイド φ 6.0 - 8.0 / ショート】	IR615
	インプラント・リムーバー φ 3.0 × 20 mm 【ナロー / ロング】	IR320
	インプラント・リムーバー φ 4.0 × 20 mm 【レギュラー / ロング】	IR420
	インプラント・リムーバー φ 5.0 × 20 mm 【ワイドφ 5.0 / ロング】	IR520
	インプラント・リムーバー φ 6.0 × 20 mm 【ワイド φ 6.0 - 8.0 / ロング】	IR620
	スクリュー・ドライバー 7 mm (ショート)	SD7
	スクリュー・ドライバー 12 mm (ミディアム)	SD12
	スクリュー・ドライバー 17 mm (ロング)	SD17
	インプラント・リムーバル・ラチェット・レンチ	IRRW

・セットでご購入いただいたお客様のみ、単品販売が可能です。 販売名:インプラントリムーバルキット 届出番号:13B1X00079000143

●製造元 Zimmer Biomet

●製造販売元 ジンマー・バイオメット・デンタル合同会社



ZIMMER BIOMET

ジンマー・バイオメット・デンタル

[本社] 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F

[大阪オフィス] 〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル4F

TEL. 0120-318-418 FAX. 0120-314-004

●製造販売業許可番号 13B1X00079

© 2020 Zimmer Biomet Dental G.K. All rights reserved. ZBD0088 Rev.2020/11