



Certain® Screw Removal Tools

サーテン スクリュー リムービングキット 使用方法

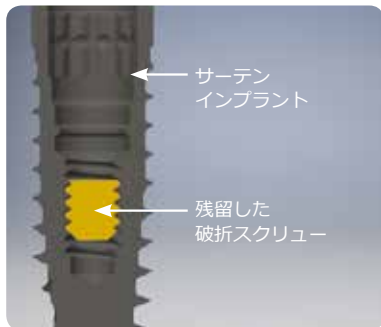


- 1** 破折した歯冠側のスクリューをインプラントから取り除きます。

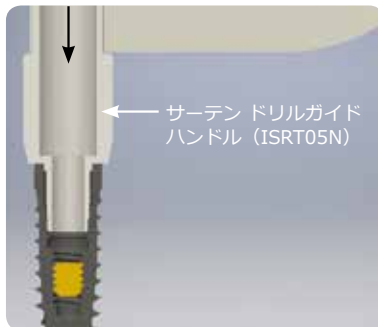


- 2** サーテン ドリルガイドハンドル (ISRT05N) の先端を、インプラントのヘックスに合せて接続します。




- 3** マニュアル リバーシングドリル (USR07) をドリルガイドハンドルの先端に挿入します。リバーシングドリルの先端を残留したスクリューの表面にしっかりと押し付けます。わずかに押し付ける力を加えながら、反時計方向に1~2回ゆっくりと回転させます。誤飲防止のため、リバーシングドリルの穴に糸を通しておきます。

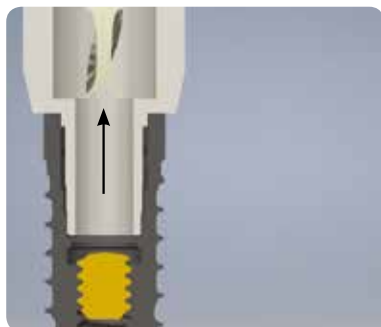

- 4** マニュアル リバーシングドリルとドリルガイドハンドルを取り外します。

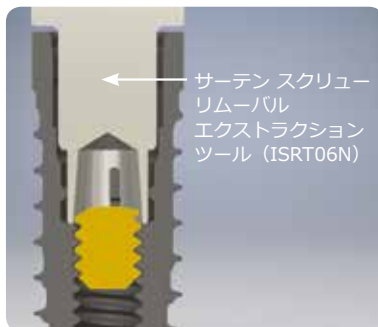

- 5** サーテン スクリュー リムーバル エクストラクション ツール (ISRT06N) をインプラントに挿入し、破折したスクリューの先端に接触していることを確認します。スクリューを把持するためにわずかにエクストラクション ツールを押し付けます。エクストラクション ツールを反時計方向に回し、破折スクリューを摘出してください。誤飲防止のため、エクストラクション ツールの穴に糸を通しておきます。

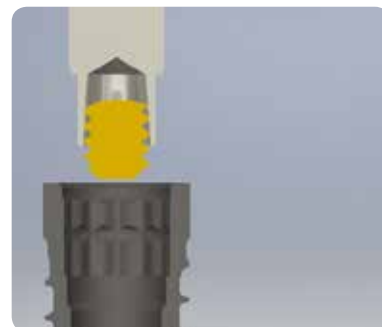


- 6** 残留スクリューを把持した状態で、エクストラクション ツールをインプラントから取り除きます。エクストラクション ツール内のスクリューを引き抜いて除去します。残留した破折スクリューの把持ができない場合には、2~5のステップを繰り返してください。



- 7** 破折したスクリューを摘出した後、サーテン ワクシング スクリュー (IWSU30) を挿入し、インプラントの内ネジとの適合を確認します。ワクシング スクリューが滑らかに挿入できない場合は内ネジが損傷しているため、インプラントの抜去を考慮してください。ワクシング スクリューが滑らかに挿入できる場合には、新たなアバットメントを接続できます。

External Hex Screw Removal Tools


エクスターナル ヘックス スクリュー リムービングキット使用方法

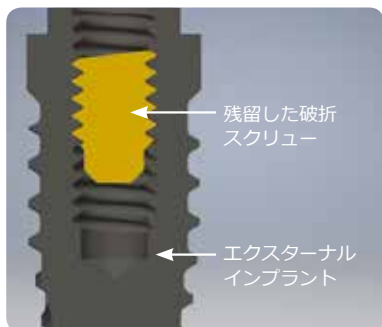

残留した破折
スクリュー


エクスターナル
インプラント

1 破折した歯冠側のスクリューをインプラントから取り除きます。

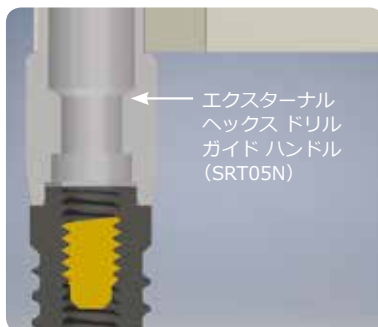

エクスターナル
ヘックス ドリル
ガイド ハンドル
(SRT05N)

2 エクスターナル ヘックス ドリルガイドハンドル (SRT05N) の先端を、インプラントのヘックスに合せて接続します。

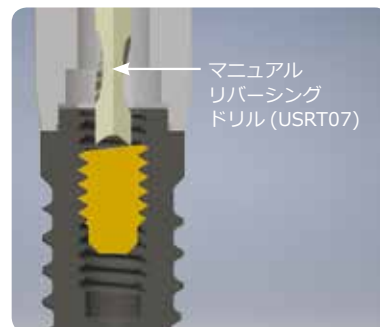

マニュアル
リバーシング
ドリル (USRT07)

3 マニュアル リバーシングドリル (USRT07) をドリルガイドハンドルの先端に挿入します。
残留したスクリューの表面に、リバーシングドリルの先端をしっかりと押し付けます。
わずかに押し付ける力を加えながら、反時計方向に1~2回ゆっくりと回転させます。
誤飲防止のため、リバーシングドリルの穴に糸を通しておきます。



4 マニュアル リバーシングドリルとドリルガイドハンドルを取り外します。




エクスターナルヘックス
スクリュー リムーバル
エクストラクション
ツール (SRT06N)

5 エクスターナル ヘックス スクリュー リムーバル エクストラクションツール (SRT06N) を用いて、破折したスクリューを把持します。わずかにエクストラクションツールを押し付け、反時計方向に回して破折スクリューを摘出します。
誤飲防止のため、エクストラクション ツールの穴に糸を通しておきます。



6 エクストラクション ツールを回転させ、残留したスクリューをインプラントから摘出します。
エクストラクション ツール内のスクリューを引き抜いて除去します。
残留した破折スクリューの把持ができない場合には、2~5のステップを繰り返します。

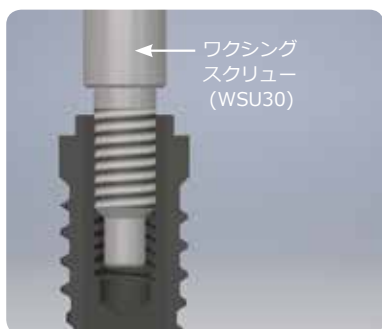

ワクシング
スクリュー
(WSU30)

7 破折したスクリューを摘出した後、ワクシングスクリュー (WSU30) を挿入し、インプラントの内ネジとの適合を確認します。ワクシングスクリューが滑らかに挿入できない場合は内ネジが損傷しているため、インプラントの抜去を考慮してください。ワクシングスクリューが滑らかに挿入できる場合には、新たなアバットメントを接続できます。

- ここに記載のあるスクリュー リムービング キットは、Biomet 3i 製 サーテン インプラント、エクスターナル ヘックスインプラントに使用されます。
- スクリュー リムービング キットのご使用前に、器具の摩耗や破損がないことを確認してください。
- スクリュー リムービング キットの使用により、破折した全てのアバットメントスクリューの摘出を保証するものではありません。

医療機器届出番号：27B1X00048040019, 27B1X00048040020

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2-7-17 住友芝公園ビル12F
〒561-0872 大阪府豊中市寺内 2-4-1 緑地駅ビル 4F

商品のお問い合わせ ☎0120-318-418 ご注文専用 FAX ☎0120-314-004



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.®