

コラテープ®
コラコート®
コラプラグ®

Colla Tape®



- ・製品番号:100P-ZB
- ・サイズ:25mm × 75mm
- ・価格:24,000円 (1箱/10枚入)

Colla Cote®



- ・製品番号:101P-ZB
- ・サイズ:20mm × 40mm
- ・価格:16,000円 (1箱/10枚入)

Colla Plug®



- ・製品番号:102P-ZB
- ・サイズ:10mm × 20mm
- ・価格:12,000円 (1箱/10個入)

吸収性コラーゲン止血用創傷被覆材

創傷治癒を促進し、より速やかな修復を可能にします。

本製品は、口腔外科手術により生じた湿潤または出血性の清潔な口腔内の創傷を保護し、出血の制御を目的としています。また、本製品を直接創傷部位に局所適用することにより、通常は2～5分以内に出血を効果的に制御することが可能となります。治癒開始後は10～14日間で吸収されます。

症例に合わせて選べる3タイプ

Colla Tape®



Colla Cote®



Colla Plug®



本製品は、軟性白色のスポンジ素材であり、柔軟でありながら脆さはありません。さらに密着性のスポンジ構造のため、適用部位への貼付も容易です。この性質は水分を吸収しても失われず、貼付部位から不意に剥がれることもありません。


コラテープの使用方法



遊離歯肉移植術などでの口蓋側歯肉採取後の状態。



パッケージよりコラテープを取り出す。

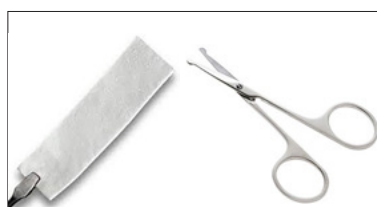

創傷面の大きさに合わせて切断。



創傷部位へ適用。

使用上のご注意

- ◎本製品は、感染または汚染した創傷には用いないでください。本製品には止血を促進する効果がありますが、全身性凝固障害の治療を目的として使用しないでください。
- ◎本製品は、パッケージを開封せずに室温で保管してください。また、許容範囲を超える温度または湿度にはさらさないでください。一旦開封したパッケージは、たとえ未使用でも廃棄し、再滅菌しないでください。
- ◎妊産婦の方を対象とした臨床試験は行われていないため、患者さまの健康へのリスクは明らかではありません。
- ◎本製品を長期間貼付したまま放置した場合の影響は、現時点では明らかではありません。

副作用

- ◎マイクロフィブリル・コラーゲン止血薬の使用に関連する副作用としては、癒着アレルギー反応、異物反応、帽状腱膜下漿液腫(1例のみ)が報告されています。
- ◎製品の主原料がコラーゲンであるため、細線維性コラーゲンで認められた副作用とは関連が認められる場合があります。
- ◎ただし本製品は、原材料処理法および純度において、止血および創傷治療への適用を目的とする他の市販されているマイクロフィブリル・コラーゲンまたはマクロフィブリル・コラーゲンとは大きく異なります。

Absorbable Collagen Wound Dressingsは、Integra Life Sciences社の製品です。
CollaTape®、CollaCote®、CollaPlug®は、Integra Life Sciences社の登録商標です。

●医療機器承認番号: 20700BZG00024000

販売元

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2-7-17 住友芝公園ビル12F

〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル4F

ご注文専用 FAX 0120-314-004 商品のお問い合わせ 0120-318-418

製造販売元

株式会社 白鵬

〒102-0083 東京都千代田区麴町1-3-23

許可番号 13B1X00079