

お客様各位

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社
 大阪府豊中市寺内 2-4-1
 緑地駅ビル 4 階

Encode[®] デザイン提携ラボラトリーのご案内

Biomet 3i 独自のテクノロジーである Encode[®] インプレッションシステムは、インプラント上部構造製作に必要な適切なマージン位置、エマーゼンスプロファイルを付与するインプラントレベルの印象採得をデジタル化した印象システムです。従来のヒーリングアバットメントの代わりに Encode[®] ヒーリングアバットメントをご使用いただくことで、その後続く印象採得がシンプルになり、コンポーネントの着脱回数の低減につながります。Encode[®] ヒーリングアバットメント上に刻印された情報を石膏模型または口腔内スキャナーで取り込み、その情報をデジタル化することで、カスタムアバットメントのデザインおよびミリングをデジタルフローで進めることができます。


これまで Encode[®] カスタムアバットメントのデザインおよび製作依頼は、弊社 BellaTek[®] デンタルラボラトリーのみで受付をしておりましたが、このたび国内の歯科技工所と業務提携し Encode[®] データの受領、Encode 純正カスタムアバットメントのデザインおよび上部構造の製作を含めてワンストップで

ご利用いただける環境となりました。
 (ミリングは従来通り、弊社スペイン工場で行います)

先生方の細かなご要望にお応えし、さらに便利にご利用いただける環境となった Encode[®] カスタムアバットメントのご用命は、別紙 Encode[®] デザイン提携歯科技工所へご連絡ください。

弊社 BellaTek[®] デンタルラボラトリーにおきましても従来通りにデザイン、ご注文を承ります。

医療機器承認番号：21900BZG00001000

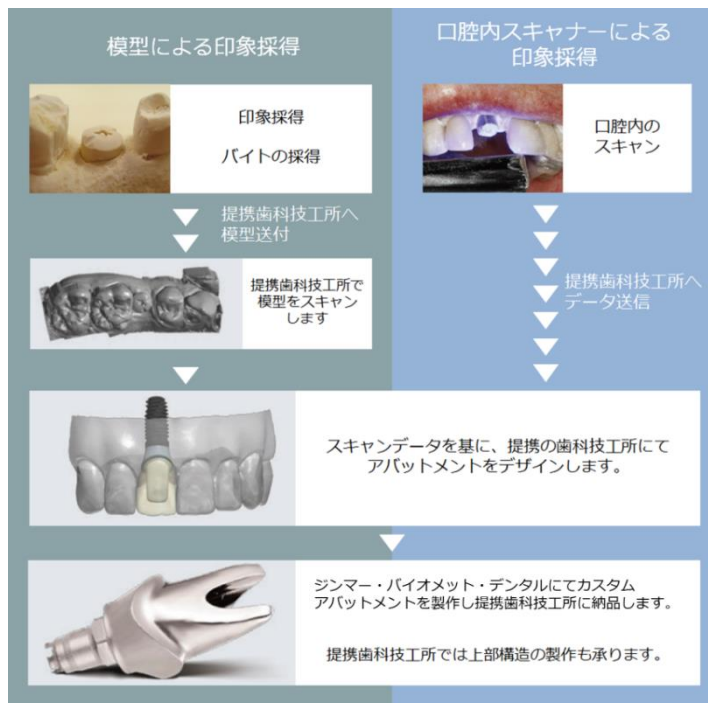

本件に関するご質問、お問合せ先：

弊社担当営業社員 または BellaTek[®] デンタルラボラトリー (06-6868-3424)

2018.5 v1

別紙

Encode[®] デザイン提携歯科技工所

株式会社 愛歯

<http://www.aishi.jp/>

〒 869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水字南方上 2849-1

TEL : 096-340-5839

株式会社 足利セラミックラボラトリー

<http://www.acl-jp.com/>

〒 373-0015 群馬県太田市東新町 672

TEL : 0276-20-5670

有限会社 KN デンタルラボラトリー

<http://kn-d.com/>

〒 319-1416 茨城県日立市田尻町 1-31-16-2F

TEL : 0294-25-3907

株式会社 サジエス

<http://sagesse.g.dgdg.jp/>

〒 733-0032 広島県広島市西区東観音町 21-10

TEL : 082-881-3581

株式会社 高崎デンタルラボラトリー

<http://www.takasaki-lab.com/>

〒 564-0043 大阪府吹田市南吹田 5 丁目 10-26

TEL : 06-6368-6550

株式会社 リック・グローバルリンク

<http://ricc-web.co.jp/global-link/>

〒 105-0003 東京都港区西新橋 3-24-9 飯田ビル 4F

株式会社 浅井歯科技研

<http://www.dl-asai.co.jp/>

〒 474-0011 愛知県大府市横根町新江 15 番地 17

TEL : 0562-48-0731

有限会社 協和デンタル・ラボラトリー

<http://www.kyowa-dental.co.jp/>

〒 270-0034 千葉県松戸市新松戸 3-260-1

TEL : 047-343-2670

ケン・デンタリックス株式会社

<http://www.ken-dentalx.com/>

〒 113-0033 東京都文京区本郷 4-1-11 デンタビル

TEL : 03-6801-8194

有限会社 セラモテックシステム

<http://www.ceramotec.jp/>

〒 802-0068 福岡県北九州市小倉北区片 2 丁目 15-12

TEL : 093-980-5940

有限会社 ノバデンタルラボラトリー

<http://www.nova-dl.com/>

〒 465-0053 愛知県名古屋市長区極楽 1-2-1

エリジウム 1F TEL : 052-753-3912

(50 音順)

最新の提携先一覧は弊社ホームページでご確認いただけます。

<http://zimmerbiometdental.jp/laboratory/>

Encode[®] カスタムアバットメントご依頼方法

【口腔内スキャナーの場合】

1. Encode ヒーリングアバットメントがセットされた歯列を口腔内スキャナーで印象採得し提携歯科技工所に送信してください。
2. 依頼先の歯科技工指示書を記入し、提携歯科技工所へご発注ください。

【石膏模型の場合】

1. Encode ヒーリングアバットメントがセットされた歯列を印象採得し石膏模型にします。
2. バイトを採得します。
3. 依頼先の歯科技工指示書を記入し、上記 1,2 を併せて提携歯科技工所へ送付し発注してください。

ご依頼方法等の詳細は提携歯科技工所までお問い合わせください。

本件に関するご質問、お問合せ先：

弊社担当営業社員 または BellaTek[®]デンタルラボラトリー (06-6868-3424)

2018.5 v1